



ENFLOW KAN ISITMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Doküman Kodu	AH.TL.22
Yayın Tarihi	24.08.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

1.AMAÇ: Cihazının doğru ve verimli kullanımını sağlamak ve hastada oluşabilecek cihaz komplikasyonlarını önlemektir.

2.KAPSAM:Ameliyathane

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR:Doktorlar, anestezi teknikerleri, anestezi teknisyenleri.

6.FAALİYET AKIŞI:

- 6.1. Cihaz hasta başında uygun yere monte edilir.
- 6.2. Güç prizine bağlanır.
- 6.3. Isıtıcı Probu bağlantı noktası açılarak kontrol edilir.
- 6.4.Isıtıcı kartuşu bu bağlantı noktalarının içine yerleştirilir.
- 6.5. Cihaz arkasındaki güç tuşundan açılır.
- 6.6.Havası alınmış serum seti bu kartuşa bağlanır.
- 6.7. Cihaz üzerinden ok tuşları ile istenilen sıcaklık ayarlanır.
- 6.8. Set açılarak kartuş ve setin havası alınır.
- 6.9. Sistem hastaya bağlanır.
- 6.10. İşlem bittiğinde sökülerek kartuş atılır.