



KEMİK DENSİTOMETRİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Doküman Kodu	MC.TL.34
Yayın Tarihi	17.10.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

1.AMAÇ: Bu talimatın hazırlanmasındaki amaç Radyoloji Bölümü Kemik Densitometresi Cihazının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır

2. KAPSAM: Radyoloji bölümünde bulunan Kemik Densitometresi Cihazlarını kapsıyor.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: Kemik Densitometresi Cihazının kullanımından görevli teknisyenler sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1.Cihazının kullanımına başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

6.2.Klimaların açık olması gerekmektedir.

6.3.Cihazın etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

6.4.İnfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır.

6.5.Sıcaklık değerlerinin firma spesifikasyonlarına uygunluğu kontrol altına alınmalıdır.

6.6.Sistemin açılması:

6.7.Cihaz power/on yapılır.

6.8.Gerekli kalibrasyon yapılır.

6.9.Hastaya uygun pozisyon verilir.

6.10.Çekim protokolü uygulanır.

6.11.Hastanın ilgili çekimi bilgisayarın yedek diskine kaydı yapılır.

6.12.Hasta raporu verilir.

7.Sistemin Kapatılması

7.1.Cihaz Power/off yapılır.