



BRUCELLA CAPT TESTİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Doküman Kodu	ML.YD.07
Yayın Tarihi	21.09.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

BİRİM/BÖLÜM:MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI/SEROLOJİ

Numunenin Kabulü ve Defter kaydı




Numunenin santrifüjlenip serum kısmının ayrıştırılması



Brucella capt testinin çalışılması:

Hasta serumu brucella capt e özel kuyucuklarda dilüent ile dilüe edilir.
Üzerine süspansiyon antijeni eklenir.
18-24 saat 37°C de bekletilir.
Sonuçlar değerlendirilir.

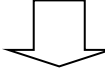

Sonuçların kaydedilmesi



Sonuçların HBYS'de 1. onayı



Sonuçların HBYS'de 2. onayı