

	VENTİLATÖR BAKIM ve KONTROL FORMU	Doküman Kodu	TY.FR.87
		Yayın Tarihi	27.09.2016
		Revizyon Numarası	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa Numarası	1

CİHAZ BİLGİLERİ					
MARKASI		KULLANIM YERİ		BAKIM PERİYODU	1 AYLIK
MODELİ		SERİ NO		BAKIM TARİHİ	
YAPILACAK KONTROLLER				YAPILDI	YAPILAMADI
1	1 aylık bakım ve kontroller teknik servis tarafından yapılacak.				
2	Cihazın giriş çıkış gaz bağlantıları ve hasta seti bağlantı noktaları kontrol edilecek.				
3	Cihazın fiziki durumu ve mekanik bağlantıları kontrol edilecek.				
4	Cihazın enerji kabloları bağlantı noktaları, topraklama bağlantısı ve sinyal kabloları kontrol edilecek.				
5	Ekranı hata kodu uyarısı olup olmadığı kontrol edilecek.				
6	Cihazın sarj durumu kontrol edilecek.				
7	6 aylık periyotlarda cihaz kapağı açılarak içerisi basınçlı hava ile temizlenecek.				
8	Cihazın soğutma fanlarının çalışması kontrol edilecek ve filtre temizliği yapılacak.				
9					
10	Yapılan kontrollerde tespit edilen arıza ve eksiklikler teknik rapor kısmına yazılacak.				

TEKNİK RAPOR		
Bakımı Yapan Teknisyen İmza	İlgili Servis Sorumlusu İmza	Teknik Servis Sorumlusu İmza