

	DEZENFEKTÖR KULLANIM TALİMATI	Doküman No	DS.TL.21
		Yayın Tarihi	11.05.2016
		Revizyon No	1
		Revizyon Tarihi	21.10.2021
		Sayfa No	1 / 1

1.AMAÇ: Alet ve malzeme yıkama ve dekontaminasyonu için kullanılan cihazların kullanımı ve kontrolünü tanımlamaktır.

2.KAPSAM: Sterilizasyon ünitesinde alet ve malzemelerin temizlik ve dekontaminasyonu için kullanılan cihazların kullanım ve kontrol uygulamalarını kapsar.

3.SORUMLULAR: Sterilizasyon ünitesinde alet ve malzemelerin temizlik ve Dekontaminasyonu için kullanılan cihazları kullanan ve kontrollerini gerçekleştiren kişiler bu talimatı uygulamaktan sorum

4. FAALİYET AKIŞI

4.1Aletler eklemleri açık şekilde sepetlere yerleştirilir.

4.2. Sepetler, aletlerin iyi temizlenmesi için aşırı doldurulmamalıdır.

4.1.2 Taslar ve geniş yüzeyli aletler en alt rafa yerleştirilmelidir.

4.1.3 Aletler yerleştirildiğinde yıkama kolları rahat dönebilmelidir.

4.1.4 Yıkanacak aletlerin bulunduğu sepetlerden birine kirlilik test indikatörü yerleştirilmelidir.

4.1.5 Sepetler yükleme rafına yerleştirilip raf makine içerisine itilir.

4.1.6 Programlar düğmesinden “2” yada setler acil ise “4” nolu program seçilmemeli ve başlat tuşu(yeşil düğme)basılır.

4.1.6 Makineye yüklenen setler not kağıdına yazılıp paketlenme alanına verilir.

4.1.7 Yıkama işlemi bittikten sonra temiz kapısı açılır ve yükleme rafı dışarıya çekilir.

4.1.8 Yıkama indikatörü kontrol edilip indikatör başarısız ise yeniden yıkama yapılır.

4.1.9 Yıkama indikatörü başarılı ise makinenin printer çıktısı kontrol edilerek ,birlikte yıkama kontrol formuna eklenir.

4.2 Yıkama kontrol formuna o çevrimde hangi setler yıkanmışa kaydedilir.

4.2.1 Dezenfektör cihazlarının filtre temizliği her gün ilk kullanımdan önce yapılmalıdır.

4.2.2 Dezenfektör cihazlarının su püskürtme kollarının temizliği en az haftada bir kez yapılmalıdır.

4.2.3 Dezenfektörde cihazlarının dış yüzeyleri ve gösterge paneli her gün nemli bir bez ile silinmelidir.