



KÜVÖZLERİN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI

Doküman Kodu	EN.TL.27
Yayın Tarihi	18.03.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

1. Küvözlerin içi ve dışı her gün temizlenmelidir. Görünür kirlenme olduğunda hemen temizlenmeli.
2. Her küvöz için ayrı bir bez kullanılmalıdır.
3. Küvöz içinde bebek varken dezenfektan veya deterjan kullanılmamalı, küvöz içi steril su ile silinmelidir.
4. Her bebek değişiminde küvöz temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
5. Bebek uzun süredir izleniyor ise küvöze en az haftada bir dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır. 1000 gr dan küçük bebekler için beş günde bir küvöz dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Dezenfeksiyon işlemi esnasında bebek başka bir yere alınarak küvözler dezenfekte edilmelidir.
6. Küvözün önce ayrılabilir bütün parçaları çıkarılmalı, fırçalanarak yıkanmalı ve deterjanla ovularak temizlenmelidir. Temizlik işleminden sonra uygun konsantrasyonda hazırlanmış dezenfektan solüsyon içinde dezenfekte edilir. Küvözün tüm parçaları 1/100 çamaşır suyu, vücut sıvı ve sekresyonları varsa 1/10'luk çamaşır suyu veya % 3'lük hidrojen peroksit ile dezenfekte edilebilir. Daha sonra durulanmalı ve kurulanmalıdır..
7. Tekrar kullanım öncesi küvöz havalandırılmalıdır.
8. En yoğun kontamine olan bölgelerin küvöz kapakçıkları ve bu kapakçıkları saran yastıkçık ve kollar , gün içinde en az iki kez küvöz dezenfektanı ile silinmelidir.
9. Küvözlerin nemlendirici kapları , haftada bir ya da bebek değişiminde steril edilmeli, steril su ile doldurulmalıdır. Kullanılmadığında bu kaplar dezenfekte edilerek kuru halde saklanmalıdır.
10. Küvöz dezenfeksiyonu dışında fan ve filtre sistemlerinin bakımı ve değişimi, üretici firma önerilerine göre yapılmalıdır.