

	HASTA BAŞI TEST CİHAZI KULLANIM TALİMATI		Doküman Kodu	KU.TL.20
			Yayın Tarihi	07.01.2016
			Revizyon No	0
			Revizyon Tarihi	0
			Sayfa no	1

AMAÇ : Hasta Başı Test Cihazları (HBTC); Hasta başında değerlendirme/test amaçlı olarak laboratuvar dışında erken tanı için kullanmak.

KAPSAM : Tüm Sağlık Çalışanı

KISALTMALAR

TANIMLAR

SORUMLULAR : Hasta güvenliği komitesi

FAALİYET AKIŞI

Serviste kullanılan glikometreler ve pulseoksimetreler hasta başı cihaz olarak kabul edilir.

Hasta başı test cihazlarından servis sorumlusu sorumludur.

Glikometre için her ay kontrol amaçlı hastanın parmağından alınan kan glikometreden, aynı anda damar yolundan alınan kan labaratuara gönderilir. Her iki sonuç karşılaştırılır. Eğer uygunsuzluk varsa depodan yeni aletle değiştirilir. Sonuçlar aylık olarak saati ve tarihi ile kayıt edilir. Ayrıca her gün kontrol serumu ile de günlük kontrolü yapılır.

Pulseoksimetreler de her ay kan gazı bakılacak hasta ile karşılaştırılıp kayıt altına alınır.

Hasta Başı Test Cihazı İle Kan Alım Kuralları;

Hasta başı test cihazlarıyla AKŞ ölçümlerinde pre analitik, analitik ve post analitik evreler kontrol edilerek hastanın kanı alınmalıdır.

Preanalitikevre: Kan alma işlemine başlamadan önce cihazın çalışıp çalışmadığı cihaz içindeki striplerin yeterli sayıda olup olmadığı kullanıcı tarafından kontrol edilir, makine düğmesinden açılarak hazır hale getirilir. Gerekli lanset, strip, betadinli pamuk, alkolü pamuk ve kuru pamuk hazır vaziyette hastanın yanına gidilir. kan alma işlemini yapacak kişi kişisel bariyer (eldiven) kullanmalıdır. Hastanın kan alınacak parmağı betadinli pamukla silinir, betadinin fazlası alkolü pamukla tekrar alınır.

Analitik evre: Lanset el değdirilmeden açılır ve hastanın parmağı iki parmak arasına sıkıştırılarak lansetin sivri kısmı tek bir darbe ile parmağına batırılır. İlk çıkan kan pamukla alınır ikinci çıkan kan cihaza ve stribin etrafına temas ettirilmeden strip haznesine damlatılır vakit kaybedilmeden cihaza yerleştirilir.

Postanalitik evre: Okunan sonuç hasta dosyasına kaydedilir beklenilenden yüksek bir değer çıkarsa hemen ilgili hekim haberdar edilir. Hastanın parmağına iki dakika basınç uygulanır tüm tıbbi atıklar enfeksiyon kontrol talimatı çerçevesinde ortamdan uzaklaştırılır, cihazın etrafına herhangi bir şekilde kan bulaşmış ise cihaz antiseptik solüsyonlarla silinerek bakımı yapılır ve yeniden kullanılmak üzere saklanır.

EKLER

- Enfeksiyon talimatı
- HBTC kontrol formu