



ELEKTRO KOTER KULLANIM TALMATI

Doküman Kodu	MC.TL.41
Yayın Tarihi	26.10.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

1.AMAÇ: KSÜ SUA Hastanesi Ameliyathane Biriminde Elektro koter cihazının düzenli kullanımını ve sorumlularını belirlemek.

2.KAPSAM: Ameliyathane.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: Cihazı kullanan hekim, hemire ve birim sorumlusu.

6. FAAL YETKİLERİ:

6.1 Elektro koter cihazının kablolarının yeterli uzunlukta olup olmadığını ve bağlantılarının doğruluğunu kontrol edilmelidir.

6.2 Elektro koter cihazının plakasını hastanın ekstremitelerinin (kol yada bacağının) metal ile temas ettirip edilmediğini kontrol edin, metal ile temas etmemelidir.Emin olduktan sonra koter plakasını hastanın uygun olan ekstremitesine disposable plak kullanılıyorsa yapıştırın. Rezistans plakası ekstremiteler ile temas edecek şekilde yapıştırın ve hastanın ekstremitelerini oynatma, kaldırma riskine karşı sabitleyiniz,bastırınız.

6.3 Koter plakası uygulanacak bölge kılıfı ise kıldan arındırılmalıdır.

6.4 Hastanın altında sıvı birikmesini önleyecek tedbirleri alınız, sıvı birikebilecek ameliyatlarda hasta altı bezi kullanınız.

6.5 Odanın nem oranının % 50 seviyesinde olmasını kontrol ediniz.

6.6 Kullanılan ünipo lar koter ise 3'lü girişe, bipolar koter ise koter ucunu 2'li girişe yerleştiriniz.

6.7 Start düğmesine basınız ve cerrahın istediği dereceye göstergesini ayarlayınız.

6.8 Son kontrolleri yaparak cihazı kullanıma hazır hale getiriniz.