

	GAZ PLAZMA BİYOLOJİK TEST İNKÜBATÖRÜ KULLANIM TALİMATI	Doküman No	SH.TL.16
		Yayın Tarihi	11.05.2016
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa No	1 / 1

1.AMAÇ : Gaz plazma (Hidrojenperoksit)sterilizasyon cihazında kullanılan biyolojik idikatör içerisindeki mikroorganizma (*Geobacillus Stearothermophilus*) kültürü için optimum sıcaklık şartlarını sağlamak.

2.KAPSAM: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

3.SORUMLULAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları ve sorumlusu

4.FAALİYET AKIŞI:

4.1 Günün ilk yüküyle birlikte bir kimyasal indikatörle birlikte bir biyolojik indikatör, paketlenerek steril edilen yük içine bırakılır.

4.2 Biyolojik indikatör test tüpünün kapağı henüz paket içinde iken üzerine bastırılarak kapatılır.

4.3 Biyolojik test paketten çıkarılarak kendi aparatıyla kırılarak inkübatör yuvalarından birine yerleştirilir.

4.4İndikatör inkübatör yuvalarından birine yerleştirilince ilgili forma indikatörün yerleştirildiği göz numarası,,yerleştiren kişi adı,yük no, tarih ve saat mutlaka kaydedilir.

4.5İnkübasyon süresince inkübatör ısını muhafaza edebilmek için gerekmedikçe kapak açılmamalıdır.24 saat sonunda renk değişimi gözlenir; mor olan rengin korunması beklenir.

4.7Test negatif sonuçlanınca, sonucu alan kişi ilgili form doldurularak arşivler.

4.8.Eğer renk sarıya dönmüşse sonuç pozitifdir ve o yükte atılan malzemeler tekrardan paketlenerek steril edilir. Eğer malzeme kullanılmışsa hastane enfeksiyon komitesine bildirilir.

Not: Acil olmadıkça Biyolojik indikatör sonuçlanmadan malzemeler birimlere verilmemelidir.